

Ergänzungsblatt zur Bedienungsanleitung

im Sinne der Richtlinie

89/336/EWG des Rates über die elektromagnetische Verträglichkeit


Es handelt sich um ein elektrisches Gerät zur Anwendung an Mensch und Tier.

Fabrikat: Elektromagnetresonanz-Biofeedbacksystem

Typ: vita-life® eMRS®

Das Produkt ist konstruiert und gefertigt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 89/336/EWG, in alleiniger Verantwortung von:

Firma: biomedis International AG, Föhrenweg 5, FL-9496 Balzers, Tel: 00423/373/8650

Balzers, 31.12.2010
Ort, Datum 
Unterschrift des Geschäftsführers

Diese Information dient als Ergänzung der Bedienungsanleitung von Abschnitt „3.3 Setup Menü“, insbesondere dem Punkt „3.3.1 Einstellen von Datum und Uhrzeit“ und gilt für Systeme bis inkl. Softwareversion VI.1.1.

Folgen Sie den nächsten 4 Schritten, um die Jahreszahl umzustellen.

Wichtiger Hinweis: Das Datum (Tag, Monat, Jahr) ist systembedingt und nimmt keinerlei Einfluss auf die Funktionsweise des vita-life® R-Systems (eMRS®).

Die korrekte Einstellung der Uhrzeit (Stunden, Minuten) ist jedoch entscheidend, da das Betriebssystem auf diese zurückgreift, um die tageszeitabhängigen Programme im Sinne der Chinesischen Organuhr richtig ausgeben zu können. Siehe auch Unterpunkt „11 Monitor“ von „3.1.5 Das Display“ auf Seite 21.


Schritt 1

Starten Sie das System durch Drücken der ON/OFF Taste (1). Während des Systemstests erscheint rechts oben im Display der Menüpunkt SETUP.




Schritt 2

Solange SETUP im Display steht, drücken sie nebenstehende Pfeiltaste (2a). Dadurch gelangen Sie in das Setup-Menü. Wählen Sie mit den Pfeiltasten (2b, 2c) das Uhrzeitsymbol aus und drücken Sie OK (2d). Nun können Sie die Einstellungen von Datum und Uhrzeit vornehmen.

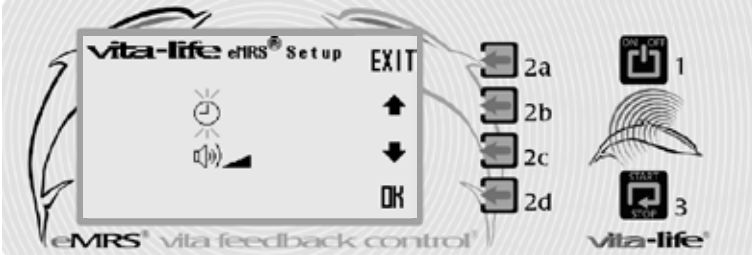

Schritt 3

Die erste Stelle (Tag) blinkt. Mit den Pfeiltasten (2b, 2c) können Sie nun den Tag einstellen. Durch Drücken von OK (2d) gelangen Sie zum Monat. Nachdem Sie das aktuelle Monat mit dem Pfeiltasten (2b, 2c) eingestellt haben, wieder mit OK (2d) bestätigen.

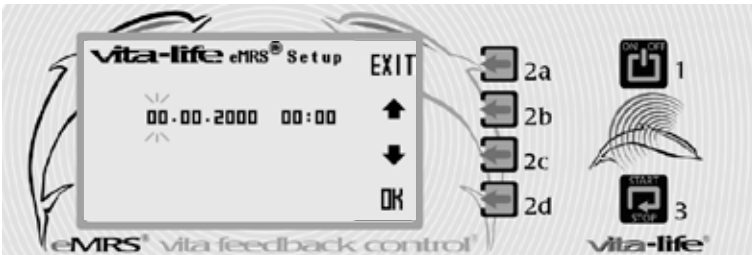

Nun sind Sie beim Jahr angelangt. Hier blinken die letzten beiden Stellen. Mit den Pfeiltasten (2b, 2c) stellen Sie die Jahreszahl auf „00“, sodass „2000“ angezeigt wird. Fahren Sie zur Einstellung der korrekten Uhrzeit im gleichen Sinne fort. Siehe auch Seite 27 und 28.



Die Jahreszahl ist systembedingt und hat keinerlei Einfluss auf die Funktionsweise des Systems, sie muss lediglich zwischen 2000 und 2010 liegen.

Schritt 4

Nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, beenden Sie durch Drücken von EXIT (2a) das Setup-Menü.



Hinweis für update: Sie können Ihr vita-life® R-System (eMRS®) beim Hersteller mittels eines Software-updates auf den neuesten Stand bringen lassen. Durch dieses update läuft die Jahreszahl auch über 2010 hinaus, wodurch vorgenannte Umstellung nicht erforderlich ist.